



Slaugivita

GAMINIO INSTRUKCIJA

Prevencinis čiūžinys
DENSITY 400



Gamintojas: Pardo



UAB "Slaugivita"

Dubijos g. 16, LT-77172 Šiauliai, tel. 841 522439, faks. 841 595279

info@slaugivita.com, www.slaugivita.com

Vartotojo instrukcija

Prevenciniai čiužiniai

Tokiems gaminiams:

DENSITY 900

DENSITY 850

DENSITY 450

DENSITY 400

DENSITY 150



Turinys

Svarbios saugos priemonės

Įvadas

Gaminio aprašymas ir jo eksploatacinės savybės

Čiužinio išpakavimas

Priežiūros instrukcijos

Kita

SVARBIOS SAUGOS PRIEMONĖS

Prieš naudodami perskaitykite visas instrukcijas

Įspėjimas!

1. Gaminys turi būti naudojamas tik pagal šioje instrukcijoje nurodytą paskirtį. Gaminio negali derinti, surinkti ar taisyti su kitomis nei šioje instrukcijoje ar kitoje dokumentacijoje nurodytomis dalimis, priedais ar atsarginėmis dalimis.
2. Čiužiniai yra apsaugoti higieniniu užvalkalu, stenkitės nenaudoti čiužiniams kitų užvalkalų.
3. NENAUDOKITE arti ugnies šaltinių/karštų paviršių, tokių kaip ugnies, degančių cigarečių ar karštų lempų. Nors gaminys yra išbandytas dėl gaisro, jį galima pažeisti, jei liesis su ugnies šaltiniais.
4. Padėkite ir naudokite gaminį taip, kad jis nebūtų prispaustas ar pažeistas. DĖMESIO: ypatingai saugokite, kad jis nebūtų pažeistas dėl suspaudimo naudojant lovos turėklus.
5. Visada įsitikinkite, kad čiužinys yra tinkamo dydžio.
6. Higieninis užvalkalas neleidžia prasiskverbti skysčiui ar orui, tačiau jis laidus garams. Užtikrinkite, kad pacientas yra tinkamoje padėtyje, kad išvengtumėte uždusimo rizikos.
7. Saugokite, kad čiužinio nepažeistų aštrūs daiktai.
8. Čiužinius kurie yra rulonuose reikia iškart išpakuoti iš rulono. Maksimalus laikas yra 3 mėnesiai kai čiužinys gali būti rulono formoje.

1. Įvadas

Prieš naudodami visada perskaitykite vartotojo instrukciją.

1.1. Bendra informacija

Šis gaminys yra medicininis gaminys, turintis CE ženklimą pagal MDD 93/42/EEC. Jis taip pat atitinka taikomus standartus: UNE EN 1021-1, UNE EN 1021-2, OEKO TEX 10, UNE EN 53127, REACH.

1.2. Paskirtis

Pardo Density linijos čiužiniai yra prevenciniai, čiužiniai, kurie yra naudojami visų rūšių priežiūros vietose skausmo palengvinimui, pragulų prevencijai ir kaip pagalbinė priemonė gydant pragulas.

2. Gaminio aprašymas ir jo eksploatacinės savybės

Denisty linijos čiužiniai yra kelių dydžių: 80 cm, 85 cm, 90 cm pločio ir 200 cm ilgio. Jei reikia kitų dydžių, kreipkitės į Slaugivitą.

2.1 Užvalkalų pristatymas

Visi užvalkalai yra taip vadinami higieniniai užvalkalai. Juos lengva tvarkyti ir naudoti užtikrinant aukščiausius valymo ir higienos standartus. Užvalkalai yra laidūs garams, kas sumažina odos sudrėkimo riziką.

Užvalkalas Cugar – užvalkalas su apsaugotu užtrauktuku iš trijų pusių. Spalva mėlyna.


Užvalkalas Select – užvalkalas su apsaugotu užtrauktuku iš trijų pusių. Spalva tamsiai žalia.

2.2 Gaminio aprašymas

Density 900

Čiužinys skirtas pragulų prevencijai bei terapijai, pacientams, kurie priskiriami labai aukštai pragulų rizikos grupei, taip pat kenčiantiems skausmus.

Gali būti naudojamas palengvinti pragulas III ir žemesnės kategorijos pragulas turintiems naudotojams.

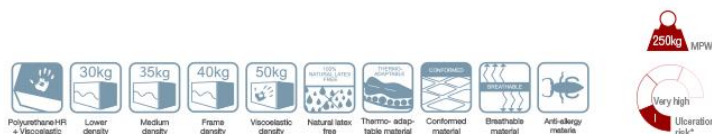

Čiužinys sudarytas iš trijų sluoksnių. Apatinis ir vidurinis iš aukštos kokybės HR porolono. Apatinis čiužinys profiliuotas.

Viršutinis sluoksnis 50kg/ m³ tankio viskoelastinis porolonas, kuris leidžia prisitaikyti prie paciento individualaus svorio, kūno formos, taip suteikiamas maksimalus komfortas.

Viršutinis sluoksnis profiliuotas pagal penkias kūno zonas, skirtas pagerinti kraujotaką ir spaudimo paskirstymą.

Čiužinio šonai iš 40kg/m³ porolono, kas leidžia išlaikyti svorį, kai ant šonų yra atsisėdama. Sutvirtinti šonai taip pat išlaiko stabilų čiužinį, kai ant jo gulima.

Čiužinio užvalkalas pagamintas iš elastingo, nepralaidaus skysčiams ir pralaidaus orui audinio.

Audinys yra dengtas atspriu ugnei sluoksniu.

Užvalkalą galima skalbti iki 95C laipsnių temperatūros vandenyje, skalbimo mašinose.

Užvalkalas yra atsparus autoklavo sterilizacijai, iki 120C temperatūros.

Užtrauktukas L arba U formos su atvartu. Užtrauktuko siūlės suldytos.

Galimi čiužinio išmatavimai: 200cm ilgis, 80/85/90cm.

Didžiausias rekomenduojamas svoris 250kg.

Garantija 3 metai.

Density 850

Čiužinys skirtas pragulų prevencijai bei terapijai, pacientams, kurie priskiriami aukštai pragulų rizikos grupei, taip pat kenčiantiems skausmus.

Gali būti naudojamas palengvinti pragulas II ir žemesnės kategorijos pragulas turintiems naudotojams.



Čiužinys sudarytas iš tvejų sluoksnių. Apatinis iš aukštos kokybės HR porolono. Apatinis čiužinys profiliuotas.

Viršutinis sluoksnis 85kg/ m³ tankio viskoelastinis porolonas, kuris leidžia prisitaikyti prie paciento individualaus svorio, kūno formos, taip suteikiamas maksimalus komfortas.

Viršutinis sluoksnis perforuotas, kad sumažinti kūno temperatūrą po guliniu.

Yra nuolydis kulnims, kur yra didžiausias spaudimas.

Čiužinio užvalkalas pagamintas iš elastingo, nepralaidaus skysčiams ir pralaidaus orui audinio. Audinys yra dengtas atspriu ugniai sluoksniu. Užvalkalą galima skalbti iki 95C laipsnių temperatūros vandenyje, skalbimo mašinose. Užvalkalas yra atsparus autoklavo sterilizacijai, iki 120C temperatūros. Užtrauktukas L arba U formos su atvartu. Užtrauktuko siūlės sulydytos. Galimi čiužinio išmatavimai: 200cm ilgis, 80/85/90cm.

Didžiausias rekomenduojamas svoris 300kg.

Garantija 3 metai.

Density 450

Porolono čiužinys skirtas pragulų prevencijai, tiems pacientams, kurie priskiriami vidutinei pragulų rizikos grupei, bei pacientai turintys II kategorijas pragulas.

Čiužinio pagrindas yra 10 cm.

Pagamintas iš aukštos kokybės HR porolono 40kg/m³, kuris turi atvirų celių struktūrą. Atvira celių struktūra leidžia orui cirkuliuoti, taip pat padaro čiužinį lengvesniu, geriau prisitaikančio prie paciento kūno.

Apatinė dalis su įvairios formos išpjovomis, kad geriau prisitaikytų prie lovdugnio ir papildomai ventilacijai.

Viršutinė čiužinio dalis trijų zonų: galvai, liemeniui ir kojoms.

Galvos ir kojų zonos išpjaustytojs bangelėmis. Viskoelastinis porolonas 50kg/m³, 5cm aukščio.

Liemens/kryžkaulio zonos porolonas iš ypatingai tankaus viskoelasto 85kg/m³, tam kad suteikti papildomą stabilumą ir spaudimo paskirsytumą šioje zonoje.

Čiužinio užvalkalas pagamintas iš elastingo, nepralaidaus skysčiams ir pralaidaus orui audinio.

Audinys yra dengtas atspriu liepsnai sluoksniu.

Užvalkalą galima skalbti iki 95C laipsnių temperatūros vandenyje, skalbimo mašinoje. Dezinfekuojamas.

Užvalkalas yra atsparus autoklavo sterilizacijai, iki 120C temperatūros.

Užtrauktukas L arba U formos su atvartu.


Galimi čiužinio išmatavimai: 200 cm ilgis, 85 cm plotis, storis 15 cm.

Didžiausias rekomenduojamas svoris 230 kg.

Garantija 3 metai.

Density 400

Porolono čiužinys skirtas pragulų prevencijai bei terapijai, pacientams, kurie priskiriami vidutinei pragulų rizikos grupei, bei pacientai turintys I- II kategorijų pragulas.

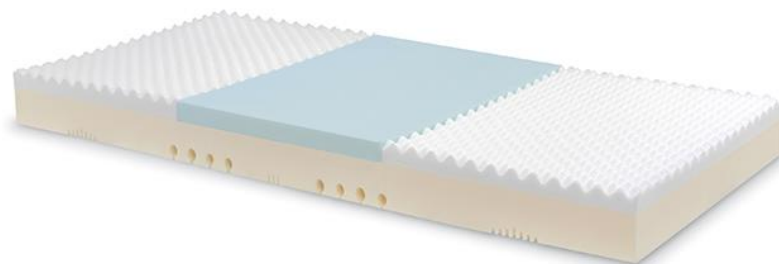

Čiužinys sudarytas iš dviejų sluoksnių. Apatinis iš aukštos kokybės HR porolono 28kg/m³. Viršutinis sluoksnis 50kg/m³ tankio viskoelastinis porolonas, kuris leidžia prisitaikyti prie paciento individualaus svorio, kūno formos, taip suteikiamas maksimalus komfortas. Čiužinio užvalkalas pagamintas iš elastingo, nepralaidaus skysčiams ir pralaidaus orui audinio. Audinys yra dengtas atspriu ugniai sluoksniu. Užvalkalą galima skalbti iki 95C laipsnių temperatūros vandenyje, skalbimo mašinose. Užvalkalas yra atsparus autoklavo sterilizacijai, iki 120C temperatūros. Užtrauktukas L arba U formos su atvartu. Užtrauktuko siūlės sulydytos. Galimi čiužinio išmatavimai: 180/190/200cm ilgis, 80/85/90cm. Didžiausias rekomenduojamas svoris 230kg. Garantija 3 metai.

Density 150

Porolono čiužinys pragulų prevencijai skirtas tiems pacientams, kurie priskiriami mažai pragulų rizikos grupei, bei pacientai turintys I kategorijas pragulas.

Čiužinį pagamintas iš HR porolono, 30kg/m³ tankio, kuris turi atvirų celių struktūrą.

Viršutinė dalis profiliuota, pagal penkias kūno zonas.

Profiluotu paviršiumi geriau

cirkuliuoja oras, taip pašalindama perteklinę temperatūrą. Apatinė dalis su išpjovomis, kad čiužinys prisitaikytų prie lovadugnio ir papildomai ventiliacijai.

Čiužinio užvalkalas pagamintas iš elastingo, nepralaidaus skysčiams ir pralaidaus orui audinio.

Audinys yra dengtas atspriu ugniai sluoksniu.

Užvalkalą galima skalbti iki 95C laipsnių temperatūros vandenyje, skalbimo mašinose.


Užvalkalas yra atsparus autoklavo sterilizacijai, iki 120C temperatūros.

Užtrauktukas L arba U formos su atvartu. Užtrauktuko siūlės sulydytos.

Galimi čiužinio išmatavimai: 180/190/200cm ilgis, 80/85/90cm.

Didžiausias rekomenduojamas svoris 190kg.

Garantija 3 metai.

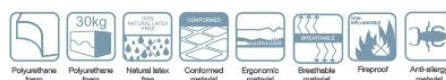

3. Čiužinio išpakavimas

Visi čiužiniai pristatomi suspausti ir supakuoti į perdirbamą plastiką. Jie yra suspausti tam, kad mūsų klientams būtų lengviau juos tvarkyti ir kad būtų sumažintas transportavimo tūris; mes sumažiname poveikį aplinkai.

1. Pradėkite nuo patikrinimo, ar nepažeista pakuotė. Nuimkite plastikinį maišą ir bet kokią apsauginę medžiagą. Atidarydami pakuotę stenkitės nenaudoti peilio, kadangi galite pažeisti higieninį užvalkalą.

2. Pataisykite užvalkalą. Čiužiniai, kurie pristatomi su dalijamu Evac užvalkalu, yra supakuoti su viršutine dalimi sulankstyta čiužinio viduje. Išlankstykite viršutinę dalį ir užtraukite užtrauktuką.
3. Prieš naudojimą čiužinys turi maždaug 2 valandas pagulėti neišpakuotas ant plokščio paviršiaus. Tačiau, jei reikia, čiužinį galima naudoti nedelsiant. Gali užtrukti iki savaitės kol čiužinys atgaus savo pilną plotį/aukštį, buvusį iki suspaudimo.
4. Čiužinius kurie yra rulonuose reikia iškart išpakuoti iš rulono. Maksimalus laikas yra 3 mėnesiai kai čiužinys gali būti rulono formoje.

5. Priežiūros instrukcijos

Prieš naudojant gaminį kitam vartotojui svarbu laikytis žemiau pateiktų nurodymų. Jei dvejojate, pasikonsultuokite su asmeniu, atsakingu už higieną, ar tiekėju, kurie padės ir duos nurodymus.

SVARBU!

Tikrinkite higieninį užvalkalą kiekvieną kartą, kai jį valote. Jei užvalkalas pažeistas, jį reikia pakeisti arba sutaisyti. Kruopščiai laikykitės vietinių instrukcijų ir valymo specialistų instrukcijų.

5.1 Higieninis užvalkalas



Užvalkalus galima nuvalyti švelnia valymo priemone (pvz. plovimo skysčiu) ir vandeniu ar tam tikslui skirta dezinfekcine priemone alkoholio pagrindu/valikliu. Ekskrementų ir kraujo dėmės būtina nedelsiant pašalinti šaltu vandeniu. Atidžiai laikykitės vietinių instrukcijų ir valiklio vartojimo instrukcijų.



Skalbimas skalbyklėje iki 95C didžiausia temperatūra.

Žema temperatūra džiovinimas džiovyklėje.

Nenaudoti chloro, baliklių.

Galima valyti sausuoju būdu, bet nenaudoti acetato (trichloretilenas).

Kita

5.1 Laikymas

Laikykite čiužinį ant plokščio paviršiaus arba kruopščiai suvyniotą/sulankstyta ir užtrauktą užtrauktuku. Visuomet laikykite gaminius kambario temperatūroje sausoje vietoje. Užtikrinkite, kad gaminys laikomas tokioje vietoje, kur jis nebus pradurtas, daužomas ar šalia kitų daiktų, kurie gali jį pažeisti. Venkite tiesioginių saulės spindulių poveikio. Jei čiužinį reikia laikyti ilgiau nei 3 mėnesius, rekomenduojame laikyti jį ant plokščio paviršiaus (nesuvyniotą ar nesulankstyta).

5.2 Ženklimas

Gaminys turi etiketę, kurioje nurodyta pagaminimo data, gaminio numeris, dydis, priežiūros ir skalbimo nurodymai, EAN brūkšninis kodas, taip pat palikta vieta savam ženklavimui.

5.3 Garantija

Smulkesnės informacijos apie kiekvienam čiužiniui suteikiamą garantiją ieškokite 2.2 skyriuje. Garantija galioja gamybos klaidoms. Garantija negalioja įprastam gaminio nusidėvėjimui ar būklės pablogėjimui, ar pažeidimams, kurie atsirado dėl nerūpestingo elgesio su gaminiu ar netinkamos jo priežiūros.

5.4 Aptarnavimas ir priežiūra

Gaminiui nereikalingas joks kitas aptarnavimas ar priežiūra išskyrus valymą, kaip aprašyta vartotojo instrukcijoje.

5.5 Taisymai

Kreipkitės į tiekėją dėl instrukcijų.

5.6 Perdirbimas

Gaminiai yra visiškai perdirbami ir turėtų būti perdirbami kaip „degios atliekos“. Išardymas nereikalingas.

5.7 Gražinimas ir skundai

Skundai turi būti pateikiami tiekėjui. Gražinama laikantis tiekėjo nurodymų ir tai galima padaryti po to, kai pateikiamas skundas. Apie transportavimo metu padarytus pažeidimus turi būti pranešama transportavimo atstovui.

Pagaminta

Industrias H. Pardo SL

Tel.: +34 976 300 033

El. paštas: info@pardo.es

Internetas: <http://pardo.es/en/contact>

Adresas:

Industrias H. Pardo SL

Los Ángeles nº5.

Polígono Centrovía

50190 La Muela,

Zaragoza

Ispanija

Tiekėjas

UAB "Slaugivita"

Dubijos g. 16, 77172 Šiauliai,
Lietuva

Tel. +370 41 522439

Fax. +370 41 595279

E-mail: info@slaugivita.com

www.slaugivita.com

Pardavėjas: UAB "Slaugivita"

GARANTINIS TALONAS

Įrengimo pavadinimas: Porolono čiuzinys pragulų profilaktikai _____

Modelis: DENSITY 400

Serijos Nr.: Nėra

Pardavimo data: _____ PVM Sąskaitos-faktūros SLS Nr.:

Pardavėjo pavardė _____ Parašas _____

Šiam parduodamam gaminiui suteikiama __36_ mėnesiai_____ garantija nuo pardavimo datos. Garantinio laikotarpio metu bus nemokamai pašalinami gedimai, susiję su gaminio medžiagų kokybe arba gamybos broku.

Garantija netaikoma:

Netinkamos priežiūros atveju : Už įsigyto gaminio (įrenginio) kasdieninę priežiūrą atsako savininkas arba jo įgaliotas asmuo. Jei gedimas atsirado dėl aplaidžiai vykdomos priežiūros pardavėjas pasilieka teisę netaikyti garantijos.

Perkrovos ir netinkamo naudojimo atveju: t.y. kai gaminys (įrenginys) naudojamas pažeidžiant eksploatacijos taisykles, naudojamas ne pagal paskirtį arba tyčinio sugadinimo atveju.

Modifikacijos atveju: Jei bandoma ardyti, remontuoti, modifikuoti gaminį (įrenginį) be pardavėjo serviso sutikimo arba buvo naudoti netinkami ar nekokybiški priedai.

Kitais atvejais: Jei gaminys (įrenginys) pažeidžiamas ar sugadinamas gaisro, vandens apliejimo (potvynio), žemės drebėjimo ir kt. stichinių nelaimių atvejais.

Garantija taikoma tik prietaiso gedimui. UAB "Slaugivita" neprisima atsakomybės už žalą padarytą kitam turtui ar asmenims. **Garantija galioja pateikus šį garantinį taloną ir pirkimo dokumento kopiją.**

Dėmesio: garantinio aptarnavimo laikotarpiu neveikiančius gaminius paims kurjeriai. Todėl, prašome sugedusį gaminį supakuoti (pageidautina originalioje pakuotėje) ir perduoti mūsų kurjeriui . Kai defektas bus pašalintas, prekė bus išsiųsta atgal.

Su garantijos sąlygomis susipažinau ir sutinku:

Pirkėjo parašas _____

Garantinis aptarnavimas tel.: 8 41 540204; 8 611 48081; 8 620 11394

info@slaugivita.com www.slaugivita.com

1. Gedimas _____

Data: _____

Panaudotos dalys: _____

Servisas _____

(Pareigos, vardas, pavardė, parašas)